

Návod k použití

Název výrobku / obchodní název

Pyromol-E

K dispozici ve velikostech: 1,0, 1,7, 2,8, 3,8, 5,0 mm

Popis produktu / zamýšlený účel

Přístroje Pyromol-E se používají k detekci zbytků bílkovin ve flexibilních endoskopických kanálech. Přístroje používají zdravotníci a vyškolený personál CSSD na odděleních CSSD v nemocnicích a lékařských ordinacích.

Návod k použití



Obrázek A

Velikost tamponu musí odpovídat průměru kanálu endoskopu.

1. Navlhčete hrot tamponu EndoSwab kapkou čisté vody. Vložte EndoSwab do testovaného kanálu a zatlačte jej až na doraz, pouze jednou.
2. Nůžkami ustříhnete tampon EndoSwab 2 cm za špičkou, vložte jej do testovací lahvičky (obrázek A), uzavřete a nechte 5 minut stát.
3. Změna barvy na modrozelenou na tamponu EndoSwab indikuje zbytky proteinu.
4. Zaznamenejte výsledek pro zajištění kvality. 1 µg zbytkového proteinu na tamponu EndoSwab vytvoří malou modrozelenou skvrnu. Velké množství rozpustných bílkovin může změnit celý testovací roztok na modrozelený.



Pereg GmbH
Porschestraße 12
84478 Waldkraiburg
Německo



1.0	77070-06X
1.7	77070-06A
2.8	77070-06B
3.8	77070-06C
5.0	77070-06D



Výkonnostní charakteristiky

- Pyromol E: Detekce bílkovinných reziduí.
- Testovací souprava dokáže detekovat 1 µg bílkovin

Verze a datum vydání IFU.

Verze: 2.0 / Datum: 22.07.2025

V případě poruchy / změny výkonu

Bezpečné jsou pouze zcela čisté nástroje. Zbytky vykázané přípravkem Pyromol-E jsou známkou neúčinného čisticího procesu.

Bezpečnostní opatření:

- Balení otevřete opatrně a manipulujte s ním opatrně.
- V práci nejezte a nepijte. Zákaz kouření. Nepřibližujte se k potravinám.
- Zabráňte kontaktu s kůží a očima.
- Skladujte chráněné před světlem, teplem a chemikáliemi.
- Používejte ochranu očí (ochranné brýle proti stříkajícím chemikáliím).
- Používejte rukavice odolné proti chemikáliím.
- Ochrana proti vdechnutí v případě výparů nebo aerosolu.
- Nepoužívejte dvakrát.
- Používejte pouze k zamýšlenému účelu.
- Před interpretací výsledků si pečlivě přečtěte pokyny.

Bezpečné kombinace se zařízeními/vybavením

Používejte pouze tampony dodávané s přípravkem Pyromol-E

Omezení kombinací

Pyromol-E používejte pouze k detekci zbytků bílkovin v endoskopickém kanálu podle přiloženého návodu.

Kontakt s alkalickými látkami a kvartérními amonnými solemi (používanými v některých dezinfekčních prostředcích) vede k falešně pozitivnímu výsledku. Glutaraldehyd nebo kyselina peroctová, které se používají pro flexibilní endoskopy, však s testem Pyromol-E neinterferují. Otisky prstů mohou obsahovat bílkovinné částice a mohou poskytnout falešně pozitivní výsledek.

Každá testovací sada obsahuje:

- 6 X test na jedno použití pro detekci zbytků bílkovin v kanálech flexibilních endoskopů
- O testovací lahvička Pyromol-E
- O EndoSwab

Zvláštní podmínky skladování a/nebo manipulace

- Skladujte při teplotě +2 °C až +25 °C
- Skladujte v uzavřeném původním obalu.
- Skladujte chráněné před světlem, teplem a chemikáliemi.

Nežádoucí účinky:

Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s prostředkem, by měl být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se nacházíte.

Významná zbytková rizika:

Po použití vždy zkontrolujte, zda je tampon stále neporušený. Po testu je třeba endoskop znovu zpracovat/dezinfikovat.

Bezpečná likvidace zařízení

Pyromol-E likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.