

Návod k použití


Název výrobku / obchodní název

SonoCheck

Popis produktu / zamýšlený účel


Přístroje SonoCheck se používají k rutinnímu monitorování a ověřování kavitace ultrazvukových čističů. Přístroje používají zdravotníci a vyškolený personál CSSD na odděleních CSSD v nemocnicích a lékařských ordinacích.

Návod k použití

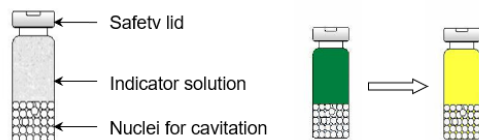

1. Při rutinním nebo validačním testu se přístroj SonoCheck vloží do koše v zátěži přístroje a zapne se testovaný cyklus. Pokud jde o počet přístrojů SonoCheck, které mají být použity v různých velikostech vany, viz uživatelská příručka pro monitorování čistoty.
2. Na konci cyklu se vizuálně zkontroluje, zda se barva lahviček změnila z modrozelené na žlutou. Pro pozitivní výsledek musí SonoCheck během cyklu zcela změnit barvu na žlutou.
3. Čas potřebný ke změně barvy může poskytnout další informace o ultrazvukové energii.
4. Výsledky se pak zaznamenávají do knihy SonoCheck.
5. V případě neuspokojivých výsledků se podívejte do průvodce řešením problémů.

Poznámka: Pro sledování účinnosti chemického čištění se doporučuje dodatečné použití přístroje TOSI-LumCheck.

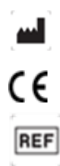

Pereg GmbH
Porschestraße 12
84478 Waldkraiburg
Německo

30550-30

Výkonnostní charakteristiky

Umožňuje detekci kavitace energie v ultrazvukové lázni.

Vpřípadě poruchy / změny výkonu

jsou bezpečné pouze zcela čisté přístroje. Neúspěšná kontrola SonoCheck je známkou neúčinného ultrazvukového procesu.

Bezpečnostní opatření:

- Neotvírejte lahvičku. Zacházejte s ním opatrně.
- V práci nejezte a nepijte. Zákaz kouření. Nepřibližujte se k potravinám.
- Zabraňte kontaktu s kůží a očima.
- Používejte ochranu očí (ochranné brýle proti stříkajícím chemikáliím).
- Používejte rukavice odolné proti chemikáliím. Ochrana proti vdechnutí v případě výparů nebo aerosolu.
- Nepoužívejte dvakrát.
- Používejte pouze k zamýšlenému účelu.
- Před interpretací výsledků si pečlivě přečtěte pokyny.

Bezpečné kombinace se zařízeními/vybavením

Nepoužívejte SonoCheck pro mycí a dezinfekční automaty kvůli vysoké teplotě během sušícího cyklu.

Omezení kombinací

SonoCheck použijte pouze pro kontrolu ultrazvukové energie při reprocessingu chirurgických nástrojů.

Každá testovací sada obsahuje:

30 X testů

Zvláštní podmínky skladování a/nebo manipulace

- Skladujte při teplotě +2 °C až +25 °C
- Skladujte v uzavřeném původním obalu.
- Skladujte chráněné před světlem, teplem, výkyvy teplot a chemikáliemi.

Nežádoucí účinky:

Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s prostředkem, by měl být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se nacházíte.

Bezpečná likvidace zařízení

SonooCheck zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

Verze a datum vydání IFU.

Verze: 2.0 / Datum: 22.07.2025