

Návod k použití


Název výrobku / obchodní název

TOSI®

Popis produktu / zamýšlený účel

Přístroje TOSI se používají k rutinnímu monitorování a ověřování účinnosti čištění mycích a dezinfekčních zařízení. Přístroje používají zdravotníci a vyškolený personál CSSD na odděleních CSSD v nemocnicích a lékařských ordinacích.

Návod k použití

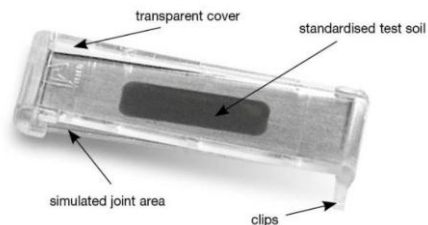

Po celou dobu testu je nutné nosit rukavice, aby nedošlo ke kontaminaci testu.

1. Při rutinním a validačním testu jsou přístroje TOSI připevněny naplocho na jednotlivých zásobnících v zátěži přístroje. Testovaný cyklus se zapne. Podrobné informace naleznete na: **Uživatelská příručka pro čisté monitorování**.
2. Abyste zabránili posunutí některého ze zařízení TOSI tlakem vody, ujistěte se, že jsou všechna bezpečně připevněna k drátěným zásobníkům, nebo v případě potřeby použijte minizásobník.
3. Na konci cyklu se TOSI vyjmou a vizuálně zkontrolují, zda na nich nezůstaly zbytky. Pozitivní výsledek je indikován zcela vyčištěným TOSI.
4. V případě neuspokojivých výsledků se podívejte do **průvodce řešením problémů**.
5. Výsledky by měly být zaznamenány do **záznamů** TOSI nebo dle protokolu oddělení.



Pereg GmbH
Porschestraße 12
84478 Waldkraiburg
Německo



11100-12

Výkonnostní charakteristiky

Standardizovaná testovací půda podle EN ISO 15883-5 sestávající z purifikovaných hovězích proteinových frakcí.

V případě poruchy / změny výkonu

Bezpečné jsou pouze zcela čisté nástroje. Zbytky na TOSI jsou známkou neúčinného procesu čištění.

Bezpečnostní opatření:

- Balení opatrně otevřete a opatrně s ním zacházejte.
- V práci nejezte a nepijte. Zákaz kouření. Nepřibližujte se k potravinám.
- Zabraňte kontaktu s kůží a očima.
- Při manipulaci s chemikáliemi je zásadně nutná ochrana očí. Používejte rukavice odolné proti chemikáliím.
- Nepoužívejte dvakrát.
- Používejte pouze k zamýšlenému účelu.
- Před interpretací výsledků si pečlivě přečtěte pokyny.

Omezení kombinací

TOSI je pouze testovací položka pro ověření čistícího výkonu mycích a dezinfekčních prostředků.

Každá testovací sada obsahuje:

12 X testů

Zvláštní podmínky skladování a/nebo manipulace

- Skladujte při teplotě +2 °C až +25 °C
- Skladujte v uzavřeném původním obalu.
- Uchovávejte v původním obalu. Ochranné pouzdro otevírejte až po použití.
- Skladujte chráněné před světlem, teplem a chemikáliemi.
- Chraňte před dezinfekčními prostředky a výpary.

Nežádoucí účinky:

Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s prostředkem, by měl být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se nacházíte.

Bezpečná likvidace zařízení

TOSI zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

Verze a datum vydání IFU.

Verze: 2.0 / Datum: 22.07.2025