

Instrukcja używania

Nazwa produktu / nazwa handlowa

HemoCheck-S

Opis produktu / przeznaczenie

Wyroby HemoCheck-S służą do wykrywania pozostałości krwi na narzędziach i powierzchniach chirurgicznych.

Wyroby te są używane przez specjalistów medycznych i przeszkolony personel odpowiedzialny za sterylizację w szpitalach i gabinetach lekarskich.

Instrukcja używania



1. W przypadku przechowywania w lodówce przed użyciem należy pozostawić test do ogrzania do temperatury pokojowej. W celu pobrania próbek mokre powierzchnie należy przetrzeć suchą wymazówką. Próbkę z powierzchni suchych należy pobierać, zwilżając wcześniej wymazówkę kroplą czystej wody. Nie używać chlorowanej wody.
2. Dokładnie pobrać próbkę. Należy skoncentrować się na obszarze, w którym podejrzewa się pozostałości (połączenia, szczeliny, widoczne plamy lub przebarwienia). Należy używać dłuższych wacików dostępnych dla instrumentów kaniulowanych.
3. Otworzyć jedną fiolkę ze wskaźnikiem (przezroczysta zakrętka A) i przelać płyn do jednej fiołki z aktywatorem (zielona zakrętka B).
4. Umieścić wymazówkę (C) w fiołce (główką w dół do płynu) i wstrząsnąć co najmniej 5 razy.
5. Sprawdzić, czy wymazówka natychmiast zmienia kolor na niebiesko-zielony, co wskazuje na pozostałości krwi na badanej powierzchni. W obecności dużej ilości krwi cały roztwór wskaźnika zmieni kolor na ciemnoniebieski. Natychmiast zapisać wynik, ponieważ późniejsza zmiana koloru jest nieistotna. Żółta zmiana koloru po aktywacji jest normalną reakcją i nie wskazuje na pozostałości krwi.

Uwaga: W przypadku łączonych narzędzi chirurgicznych pozostałości krwi najczęściej znajdują się wewnątrz przegubów, z których nie można pobrać próbek za pomocą wymazówki. W tym celu należy użyć wskaźników TOSI, aby sprawdzić skuteczność myjni-dezynfektora.



Pereg GmbH
Porschestraße 12
84478 Waldkraiburg
Niemcy

67067-12

Parametry użytkowe

- o Zestaw testowy może wykryć 0,1 µg krwi, wykazując jasnoniebiesko-zielone zabarwienie. 1 µg krwi w teście da zabarwienie ciemnoniebieskie.
- o Ze względu na wysoką zawartość peroksydaz we krwi do wykrywania pozostałości krwi stosuje się reakcję enzymatyczną.

W przypadku nieprawidłowego działania / zmiany parametrów użytkowych

Tylko całkowicie czyste narzędzia są bezpieczne. Pozostałości krwi wykazane przez HemoCheck-S wskazują na nieskuteczny proces czyszczenia.

Środki ostrożności:

- Ostrożnie otworzyć opakowanie i obchodzić się z jego zawartością.
- Nie jeść i nie pić w pracy. Nie palić. Trzymać z dala od żywności.
- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- Przechowywać z dala od światła, ciepła i chemikaliów.
- Stosować ochronę oczu (gogle przeciwbryzgowe).
- Nosić rękawice odporne na chemikalia.
- Stosować środki ochrony przed wdychaniem oparów lub aerozoli.
- Nie używać dwukrotnie.
- Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed interpretacją wyników należy uważnie przeczytać instrukcję.

Bezpieczne kombinacje z urządzeniami / sprzętem

Należy używać wyłącznie wymazówek dostarczonych z HemoCheck-S.

Ograniczenia dotyczące kombinacji

Kontakt ze środkami utleniającymi, takimi jak chlor lub podchloryn, spowoduje uzyskanie wyniku fałszywie dodatniego. Pozostałości krwi po czyszczeniu kwasem nadoctowym lub nadtlenkiem wodoru nie mogą zostać wykryte. W takim przypadku test nie może być użyty do wykrywania pozostałości krwi.

Każdy zestaw testowy zawiera:

12 x jednorazowy test do wykrywania pozostałości krwi na narzędziach i powierzchniach.

o Fiolka ze wskaźnikiem (przezroczysta nasadka)

o Fiolka z aktywatorem (zielony kapsel)

o Wymazówka

Specjalne warunki przechowywania i/lub obsługi

- Przechowywać w temperaturze od +2°C do +25°C
- Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.
- Przechowywać z dala od światła, ciepła i chemikaliów.

Zdarzenia niepożądane:

Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.

Bezpieczna utylizacja wyrobu

HemoCheck-S należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Wersja i data wydania IFU.

Wersja: 2.0 Data: 22.07.2025