

Instrukcja używania

Nazwa produktu / nazwa handlowa

HydroCheck-E

Dostępne rozmiary: 1,0; 1,7; 2,8; 3,8; 5,0 mm

Opis produktu / przeznaczenie

Wyroby HydroCheck-E służą do wykrywania pozostałości wody w kanale giętkiego endoskopu.

Wyroby te są używane przez specjalistów medycznych i przeszkolony personel odpowiedzialny za sterylizację w szpitalach i gabinetach lekarskich.

Instrukcja używania



Podczas całej procedury testowej należy nosić rękawiczki, aby uniknąć zanieczyszczenia testu.

Nie otwierać testu HydroCheck-E przed użyciem.

Rozmiar wymazówki musi być zgodny ze średnicą kanału endoskopu.

1. Włożyć wymazówkę EndoSwab do testowanego kanału i wepchnąć ją do końca, tylko raz.
2. Natychmiast po pobraniu próbki odciąć wymazówkę EndoSwab nożyczkami 2 cm za końcówką i umieścić w fiolce testowej. Zamknąć i wstrząsnąć co najmniej 3 razy.
3. Zmiana koloru wymazówki EndoSwab na fioletowy wskazuje na pozostałości wody w badanym kanale.
4. Niewielka ilość pozostałej wody na wymazówce EndoSwab zostanie wskazana przez małą fioletową plamkę. Duża ilość wody może zmienić kolor całego testu na fioletowy.



Pereg GmbH
Porschestraße 12
84478 Waldkraiburg
Niemcy



1.0	77080-06X
1.7	77080-06A
2.8	77080-06B
3.8	77080-06C
5.0	77080-06D

Parametry użytkowe

HydroCheck-E: Wykrywanie pozostałości wody w kanale endoskopu.

Zestaw testowy może wykryć 0,05 µl pozostałości wody w kanale endoskopu.

W przypadku nieprawidłowego działania / zmiany parametrów użytkowych

Endoskopy giętkie muszą być przechowywane w suchym miejscu. Pozostałości wody wskazane przez HydroCheck mogą zagrozić bezpiecznemu przechowywaniu.

Środki ostrożności:

- Ostrożnie otworzyć opakowanie i obchodzić się z jego zawartością.
- Nie jeść i nie pić w pracy. Nie palić. Trzymać z dala od żywności.
- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią.
- Stosować ochronę oczu (gogle przeciwbryzgowe).
- Nosić rękawice odporne na chemikalia.
- Stosować środki ochrony przed wdychaniem pyłu.
- Nie używać dwukrotnie.
- Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed interpretacją wyników należy uważnie przeczytać instrukcje.

Bezpieczne kombinacje z urządzeniami / sprzętem

Używać wyłącznie wymazówek dostarczonych z testem HydroCheck-E. Nie otwierać testu HydroCheck-E przed użyciem.

Ograniczenia dotyczące kombinacji

Kontakt z jakimkolwiek źródłem wilgoci, np. odciskiem palca, może doprowadzić do uzyskania wyniku fałszywie dodatniego. Jeśli wymazówka EndoSwab nie zostanie przetestowana natychmiast, może wyschnąć i dać wynik fałszywie ujemny.

Każdy zestaw testowy zawiera:

6 x jednorazowy test do wykrywania pozostałości wody w kanałach endoskopu.

O Test HydroCheck-E

O Wymazówka EndoSwab

Specjalne warunki przechowywania i/lub obsługi

- Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C).
- Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.
- Przechowywać w suchym miejscu.

Zdarzenia niepożądane:

Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.

Znaczące ryzyko rezydualne:

Po użyciu należy zawsze sprawdzać, czy wymazówka jest nadal nienaruszona. Po badaniu endoskop należy ponownie poddać przetwarzaniu / dezynfekcji.

Bezpieczna utylizacja wyrobu

HydroCheck-E należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Wersja i data wydania IFU.

Wersja: 2.0 Data: 22.07.2025