

Instrukcja używania

Nazwa produktu / nazwa handlowa

Pyromol-E

Dostępne rozmiary: 1,0; 1,7; 2,8; 3,8; 5,0 mm

Opis produktu / przeznaczenie

Wyroby Pyromol-E służą do wykrywania pozostałości białek w kanałach giętkiego endoskopu. Wyroby te są używane przez specjalistów medycznych i przeszkolony personel odpowiedzialny za sterylizację w szpitalach i gabinetach lekarskich.

Instrukcja używania



Ilustracja A

Rozmiar wymazówki musi być zgodny ze średnicą kanału endoskopu.

1. Zwilżyć końcówkę wymazówki EndoSwab kroplą czystej wody. Włożyć wymazówkę EndoSwab do testowanego kanału i wepchnąć ją do końca, tylko raz.
2. Odciać wymazówkę EndoSwab nożyczkami 2 cm za końcówką, umieścić w fiolce testowej (ilustracja A), a następnie zamknąć i odstawić fiolkę na 5 minut.
3. Zmiana koloru wymazówki EndoSwab na niebiesko-zielony wskazuje na pozostałości białka.
4. Należy zapisać wynik na potrzeby zapewnienia jakości. 1 µg pozostałości białka na wymazówce EndoSwab spowoduje powstanie małej niebiesko-zielonej plamki. Duża ilość rozpuszczalnego białka spowodować zmianę koloru całego roztworu testowego na niebieskozielony.

	Pereg GmbH
	Porschestraße 12
	84478 Waldkraiburg
	Niemcy
	1.0 77070-06X
	1.7 77070-06A
	2.8 77070-06B
	3.8 77070-06C
	5.0 77070-06D

Parametry użytkowe

- Pyromol E: Wykrywanie pozostałości białka.
- Zestaw testowy może wykryć 1 µg białka

W przypadku nieprawidłowego działania / zmiany parametrów użytkowych

Tylko całkowicie czyste narzędzia są bezpieczne. Pozostałości krwi wykazane przez Pyromol-E wskazują na nieskuteczny proces czyszczenia.

Środki ostrożności:

- Ostrożnie otworzyć opakowanie i obchodzić się z jego zawartością.
- Nie jeść i nie pić w pracy. Nie palić. Trzymać z dala od żywności.
- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- Przechowywać z dala od światła, ciepła i chemikaliów.
- Stosować ochronę oczu (gogle przeciwbryzgowe).
- Nosić rękawice odporne na chemikalia.
- Stosować środki ochrony przed wdychaniem oparów lub aerozoli.
- Nie używać dwukrotnie.
- Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed interpretacją wyników należy uważnie przeczytać instrukcje.

Bezpieczne kombinacje z urządzeniami / sprzętem

Używać wyłącznie wymazówek dostarczonych z wyrobem Pyromol-E

Ograniczenia dotyczące kombinacji

Pyromol-E należy stosować wyłącznie do wykrywania pozostałości białka w kanale endoskopu, zgodnie z załączoną instrukcją. Kontakt z substancjami alkalicznymi i czwartorzędowymi solami amoniowymi (stosowanymi w niektórych środkach dezynfekujących) spowoduje uzyskanie wyniku fałszywie dodatniego. Jednakże aldehyd glutarowy lub kwas nadoctowy, stosowane w endoskopach giętkich, nie będą zakłócać testu Pyromol-E. Odciski palców mogą zawierać cząsteczki białka i mogą doprowadzić do uzyskania wyniku fałszywie dodatniego.

Każdy zestaw testowy zawiera:

- 6 x jednorazowy test do wykrywania pozostałości białka w kanałach giętkiego endoskopu
- O Fiolka testowa Pyromol-E
- O Wymazówka EndoSwab

Specjalne warunki przechowywania i/lub obsługi

- Przechowywać w temperaturze od +2°C do +25°C
- Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.
- Przechowywać z dala od światła, ciepła i chemikaliów.

Zdarzenia niepożądane:

Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.

Znaczące ryzyko rezydualne:

Po użyciu należy zawsze sprawdzać, czy wymazówka jest nadal nienaruszona. Po badaniu endoskop należy ponownie poddać przetwarzaniu / dezynfekcji.

Bezpieczna utylizacja wyrobu

Pyromol-E należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Wersja i data wydania IFU.

Wersja: 2.0 Data: 09.07.2025