

Instrucțiuni de utilizare

Denumirea produsului/denumirea comercială

HydroCheck-E

Disponibil în dimensiunile: 1,0, 1,7, 2,8, 3,8, 5,0 mm

Descrierea produsului/Scopul utilizării

Dispozitivele HydroCheck-E se utilizează pentru detectarea apei reziduale în canalele endoscoapelor flexibile. Dispozitivele se utilizează de cadrele medicale și de personalul instruit în departamentele de sterilizare centrale din spitale și cabinete medicale.

Instrucțiuni de utilizare



Trebuie să purtați mănuși pe toată durata procedurii de testare pentru a evita contaminarea testului.

Nu deschideți testul HydroCheck-E înainte de utilizare.

Dimensiunea bețișorului trebuie să fie compatibilă cu diametrul canalului endoscopului.

1. Introduceți EndoSwab în canalul care urmează a fi testat și împingeți-l complet prin acesta, o singură dată.
2. Imediat după recoltare, tăiați EndoSwab la 2 cm în spatele vârfului cu foarfeca și introduceți-l în flaconul de testare. Închideți falconul și agitați-l de cel puțin 3 ori.
3. O schimbare a culorii în violet pe EndoSwab indică prezența apei reziduale în canalul testat.
4. O cantitate mică de apă reziduală pe EndoSwab va fi indicată printr-un mic punct violet. O cantitate mare de apă poate colora întregul test în violet.

	Pereg GmbH
	Porschestraße 12
	84478 Waldkraiburg
	Germania
	1.0 77080-06X
	1.7 77080-06A
	2.8 77080-06B
	3.8 77080-06C
	5.0 77080-06D

Caracteristici de performanță

HydroCheck-E: Detectarea apei reziduale în canalul endoscopului.
Kitul de testare poate detecta 0,05 µL de apă reziduală într-un canal de endoscop.

În caz de defecțiune/modificare a performanțelor

Endoscoapele flexibile trebuie păstrate uscate. Apa reziduală indicată de HydroCheck poate periclita păstrarea în siguranță.

Precauții:

- Deschideți pachetul cu atenție și manipulați-l cu grijă.
- Nu mâncați și nu beți în timpul lucrului. Nu fumați. Păstrați produsul departe de alimente.
- Evitați contactul cu pielea și ochii.
- Păstrați produsul ferit de lumină, căldură și substanțe chimice.
- Folosiți ochelari de protecție (împotriva stropilor chimici).
- Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice.
- Purtați un dispozitiv de protecție împotriva inhalării în caz de praf.
- Nu folosiți produsul de două ori.
- Utilizați produsul numai în scopul prevăzut.
- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a interpreta rezultatele.

Combinații sigure cu dispozitive/echipamente

Utilizați numai bețișoare furnizate cu HydroCheck-E. Nu deschideți testul HydroCheck-E înainte de utilizare.

Restricții privind combinațiile

Contactul cu orice sursă de umiditate, de exemplu o amprentă, poate da un rezultat fals pozitiv. Dacă bețișorul EndoSwab nu este testat imediat, acesta se poate usca și poate da un rezultat fals negativ.

Fiecare kit de testare conține:

6 teste de unică folosință pentru detectarea apei reziduale în canalele endoscopice.

- Test HydroCheck-E
- EndoSwab (bețișor)

Condiții speciale de depozitare și/sau manipulare

- Păstrați produsul la temperatura camerei (între +15°C și +25°C).
- Păstrați-l în ambalajul original închis.
- Păstrați-l într-un loc uscat.

Efecte secundare:

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu acest dispozitiv trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care vă aflați.

Riscuri reziduale semnificative:

După utilizare, verificați întotdeauna dacă bețișorul este încă intact. După test, endoscopul trebuie să fie reprocessat/dezinfectat din nou.

Eliminarea sigură a dispozitivului

Eliminați HydroCheck-E în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Versiunea și data emiterii instrucțiunilor de utilizare.

Versiunea: 2.0 Data: 22.07.2025