

Instrucțiuni de utilizare


Denumirea produsului/denumirea comercială

Test Pyromol

Descrierea produsului/Scopul utilizării

Dispozitivele de test Pyromol sunt utilizate pentru detectarea reziduurilor de proteine pe instrumentele chirurgicale și pe suprafețe. Dispozitivele se utilizează de cadrele medicale și de personalul instruit în departamentele de sterilizare centrale din spitale și cabinete medicale.

Instrucțiuni de utilizare

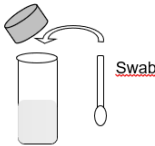

1. Suprafețele umede trebuie tamponate cu un bețișor uscat de bumbac. Suprafețele uscate trebuie tamponate prin umezirea bețișorului cu o picătură de apă curată.
2. Tamponați bine proba. Concentrați-vă asupra zonei unde suspectați prezența reziduurilor (îmbinări, crăpături, pete vizibile sau decolorări). Utilizați bețișoarele mai lungi disponibile pentru instrumentele canulate.
3. Introduceți bețișorul în flacon, închideți și lăsați să stea timp de 5 minute. Verificați bețișorul pentru o schimbare a culorii în albastru-verde, indicând prezența reziduurilor de proteine pe suprafața testată. Dacă există reziduuri de proteine, schimbarea de culoare poate fi vizibilă după 1 minut. Un timp de așteptare mai lung va oferi un rezultat mai clar și o culoare mai intensă.
4. Înregistrați rezultatul pentru asigurarea calității. 1 µg de reziduu de proteine pe bețișor va dezvolta un mic punct albastru-verde. O cantitate mare de proteine solubile poate colora întreaga soluție de test în albastru-verde.

NOTĂ: În cazul instrumentelor chirurgicale articulate, reziduurile de sânge se găsesc cel mai frecvent în interiorul articulațiilor, unde nu se pot preleva probe cu un bețișor. În acest scop, trebuie utilizați indicatorii TOSI pentru a verifica eficiența de curățare a mașinii de spălat-dezinfectat.

Caracteristici de performanță

Kitul de testare poate detecta 1µg de proteine.
Pentru detectarea reziduurilor de proteine se utilizează o metodă de legare a colorantului.

În caz de defecțiune/modificare a performanțelor

Doar instrumentele complet curate sunt sigure. Prezența reziduurilor evidențiate de testul Pyromol indică un proces de curățare inefficient.

Precauții:

- Deschideți pachetul cu atenție și manipulați-l cu grijă.
- Nu mâncați și nu beți în timpul lucrului. Nu fumați.
Păstrați produsul departe de alimente.
- Evitați contactul cu pielea și ochii.
- Păstrați produsul ferit de lumină, căldură și substanțe chimice.
- Folosiți ochelari de protecție (împotriva stropilor chimici).
- Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice.
- Purtați un dispozitiv de protecție împotriva inhalării în caz de vapori sau aerosoli.
- Nu folosiți produsul de două ori.
- Utilizați produsul numai în scopul prevăzut.
- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a interpreta rezultatele.

Combinații sigure cu dispozitive/echipamente

Utilizați numai bețișoare furnizate cu testul Pyromol.

Restricții privind combinațiile

Contactul cu substanțe alcaline poate da un rezultat fals pozitiv. Sărurile cuaternare de amoniu (utilizați în câțiva dezinfectanți) vor da un rezultat fals pozitiv.
Amprente pot conține particule de proteine și pot da un rezultat fals pozitiv.

Fiecare kit de testare conține:

- 20 teste de unică folosință pentru detectarea reziduurilor de proteine pe instrumente și suprafețe.
- Flacon de test Pyromol
 - Bețișor

Condiții speciale de depozitare și/sau manipulare

- Păstrați produsul la temperaturi între +2°C și +25°C
- Păstrați-l în ambalajul original închis.
- Păstrați produsul ferit de lumină, căldură și substanțe chimice.

Efecte secundare:

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu acest dispozitiv trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care vă aflați.

Eliminarea sigură a dispozitivului

Eliminați testul Pyromol în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Versiunea și data emiterii instrucțiunilor de utilizare.

Versiunea: 2.0 Data: 22.07.2025



Pereg GmbH
Porschestraße 12
84478 Waldkraiburg
Germania



67070-20