

Instrucțiuni de utilizare


Denumirea produsului/denumirea comercială

SonoCheck

Descrierea produsului/Scopul utilizării

Dispozitivele SonoCheck se utilizează pentru monitorizarea de rutină și validarea cavității în curătoarele cu ultrasunete. Dispozitivele se utilizează de cadrele medicale și de personalul instruit în departamentele de sterilizare centrale din spitale și cabinete medicale.

Instrucțiuni de utilizare

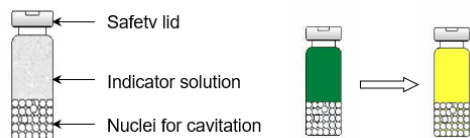

1. Pentru testul de rutină sau de validare, plasați SonoCheck în coșul încărcăturii de instrumente, și porniți ciclul care urmează să fie testat. Referitor la numărul de dispozitive SonoCheck care trebuie utilizate în băi de dimensiuni diferite, vă rugăm să consultați ghidul de utilizare pentru monitorizarea curățeniei.
2. La sfârșitul ciclului, flacoanele trebuie verificate vizual pentru schimbarea culorii din albastru-verde în galben. Pentru un rezultat pozitiv, SonoCheck trebuie să se schimbe complet în galben în timpul ciclului.
3. Timpul necesar pentru schimbarea culorii poate furniza informații suplimentare cu privire la energia ultrasonică.
4. Rezultatele trebuie apoi înregistrate în jurnalul SonoCheck.
5. În cazul unor rezultate nesatisfăcătoare, consultați ghidul de depanare.

Notă: Pentru monitorizarea eficacității curățării chimice a procesului, se recomandă utilizarea suplimentară a TOSI-LumCheck.



Pereg GmbH
Porschestraße 12
84478 Waldkraiburg
Germania



30550-30

Caracteristici de performanță

Pentru a oferi o detecție de tip admis/respins a energiei de cavitație într-un baie cu ultrasunete.

În caz de defecțiune/modificare a performanțelor

Doar instrumentele complet curate sunt sigure. Un dispozitiv SonoCheck care eșuează indică un proces ultrasonic inefficient.

Precauții:

- Nu deschideți flaconul. Manipulați-l cu grijă.
- Nu mâncați și nu beți în timpul lucrului. Nu fumați. Păstrați produsul departe de alimente.
- Evitați contactul cu pielea și ochii.
- Folosiți ochelari de protecție (împotriva stropilor chimici).
- Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice. Purtați un dispozitiv de protecție împotriva inhalării în caz de vapori sau aerosoli.
- Nu folosiți produsul de două ori.
- Utilizați produsul numai în scopul prevăzut.
- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a interpreta rezultatele.

Combinații sigure cu dispozitive/echipamente

Nu utilizați SonoCheck pentru mașinile de spălat și dezinfectat din cauza temperaturilor ridicate din timpul ciclului de uscare.

Restricții privind combinațiile

SonoCheck se utilizează numai pentru verificarea energiei ultrasonice la reprocessarea instrumentelor chirurgicale.

Fiecare kit de testare conține:

30 teste

Condiții speciale de depozitare și/sau manipulare

- Păstrați produsul la temperaturi între +2°C și +25°C
- Păstrați-l în ambalajul original închis.
- Păstrați produsul ferit de lumină, căldură, fluctuații de temperatură și substanțe chimice.

Efecte secundare:

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu acest dispozitiv trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care vă aflați.

Eliminarea în siguranță a dispozitivului

Eliminați SonoCheck în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Versiunea și data emiterii instrucțiunilor de utilizare.

Versiunea: 2.0 Data: 22.07.2025