

Instrucțiuni de utilizare


Denumirea produsului/denumirea comercială

TOSI®

Descrierea produsului/Scopul utilizării

Dispozitivele TOSI se utilizează pentru monitorizarea și validarea de rutină a eficacității de curățare a mașinilor de spălat și dezinfectat și a aparatelor de curățat cu ultrasunete. Dispozitivele se utilizează de cadrele medicale și de personalul instruit în departamentele de sterilizare centrale din spitale și cabinete medicale.

Instrucțiuni de utilizare

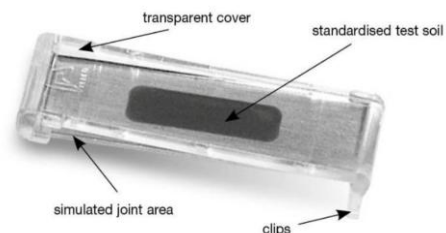

Trebuie să purtați mănuși pe toată durata procedurii de testare pentru a evita contaminarea testului.

1. Pentru testul de rutină și de validare, TOSI se fixează orizontal pe tăvile individuale de instrumente în cadrul încărcăturii de instrumente. Porniți ciclul care urmează să fie testat. Pentru informații detaliate, vă rugăm să consultați: **Ghidul utilizatorului pentru monitorizarea curățeniei.**
2. Pentru a evita deplasarea vreunui dispozitiv TOSI din cauza presiunii apei, asigurați-vă că toate sunt fixate în siguranță pe tăvile metalice sau utilizați mini-tava, dacă este necesar.
3. La sfârșitul ciclului, dispozitivele TOSI trebuie scoase și verificate vizual pentru reziduuri. Un rezultat pozitiv este indicat de un TOSI complet curat.
4. În cazul unor rezultate nesatisfăcătoare, consultați **ghidul de depanare.**
5. Rezultatele trebuie înregistrate în **jurnalul** TOSI sau în conformitate cu protocolul departamentului.

Caracteristici de performanță

Material de test standardizat conform EN ISO 15883-5, constând din fracții purificate de proteine bovine.

În caz de defecțiune/modificare a performanțelor

Doar instrumentele complet curate sunt sigure. Reziduurile rămase pe TOSI indică un proces de curățare inefficient.

Precauții:

- Deschideți pachetul cu atenție și manipulați-l cu grijă.
- Nu mâncați și nu beți în timpul lucrului. Nu fumați. Păstrați produsul departe de alimente.
- Evitați contactul cu pielea și ochii.
- În principiu, în timpul manipulării cu substanțe chimice este necesară protecția ochilor. Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice.
- Nu folosiți produsul de două ori.
- Utilizați produsul numai în scopul prevăzut.
- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a interpreta rezultatele.

Restricții privind combinațiile

TOSI este doar un element de testare pentru verificarea performanței de curățare a mașinilor de spălat și dezinfectat.

Fiecare kit de testare conține:

12 teste

Condiții speciale de depozitare și/sau manipulare

- Păstrați produsul la temperaturi între +2°C și +25°C
- Păstrați-l în ambalajul original închis.
- Păstrați-l în ambalajul original. Nu deschideți punga de protecție până la utilizare.
- Păstrați produsul ferit de lumină, căldură și substanțe chimice.
- Țineți-l departe de dezinfectanți și de vapori.

Efecte secundare:

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu acest dispozitiv trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care vă aflați.

Eliminarea în siguranță a dispozitivului

Eliminați TOSI în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Versiunea și data emiterii instrucțiunilor de utilizare.

Versiunea: 2.0 Data: 22.07.2025



Pereg GmbH
Porschestraße 12
84478 Waldkraiburg
Germania

11100-12