

Instrucțiuni de utilizare


Denumirea produsului/denumirea comercială

TOSI®-LumCheck

Descrierea produsului/Scopul utilizării


Dispozitivele TOSI-LumCheck/LumCheck se utilizează pentru monitorizarea și validarea de rutină a eficacității de curățare a mașinilor de spălat și dezinfectat și a aparatelor de curățat cu ultrasunete. Dispozitivele se utilizează de cadrele medicale și de personalul instruit în departamentele de sterilizare centrale din spitale și cabinete medicale.

Instrucțiuni de utilizare

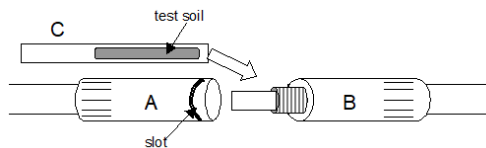

Trebuie să purtați mănuși pe toată durata procedurii de testare pentru a evita contaminarea testului.

1. Deșurubați dispozitivul LumCheck: detașați partea A (marcată cu o fantă) de partea B (vezi imaginea).
2. Deschideți punga de protecție a TOSI®-LumCheck și introduceți obiectul testat (partea C) în partea B, așa cum se arată în imagine. Nu atingeți zona acoperită cu materialul de test.
3. Închideți la loc dispozitivul LumCheck.
4. Conectați dispozitivul LumCheck la sistemul de clătire a mașinii de spălat (de exemplu, o conexiune luer-lock) sau reprocesați-l în același mod ca și instrumentele canulate.
5. Deschideți dispozitivul după ciclul de reprocesare: deconectați partea A de partea B pentru a îndepărta TOSI®-LumCheck fără a atinge zona acoperită cu materialul de test! Verificați dacă există reziduuri vizibile.
6. În cazul unor rezultate nesatisfăcătoare, consultați ghidul de depanare.

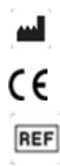

Pereg GmbH
Porschestraße 12
84478 Waldkraiburg
Germania

20100-25

Caracteristici de performanță

Material de test standardizat conform EN ISO 15883-5, constând din fracții purificate de proteine bovine.

În caz de defecțiune/modificare a performanțelor

Doar instrumentele complet curate sunt sigure. Reziduurile rămase pe TOSI-LumCheck indică un proces de curățare ineficient.

Precauții:

- Deschideți pachetul cu atenție și manipulați-l cu grijă.
- Nu mâncați și nu beți în timpul lucrului. Nu fumați. Păstrați produsul departe de alimente.
- Evitați contactul cu pielea și ochii.
- În principiu, în timpul manipulării substanțelor chimice este necesară protecția ochilor. Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice.
- Nu folosiți produsul de două ori.
- Utilizați produsul numai în scopul prevăzut.
- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a interpreta rezultatele.

Restricții privind combinațiile

TOSI-FlexiCheck este doar un element de testare pentru verificarea performanței de curățare a mașinilor de spălat și dezinfectat și a aparatelor de curățat cu ultrasunete.

Fiecare kit de testare conține:

25 teste

Condiții speciale de depozitare și/sau manipulare

- Păstrați produsul la temperaturi între +2°C și +25°C
- Păstrați-l în ambalajul original închis.
- Păstrați-l în ambalajul original. Nu deschideți punga de protecție până la utilizare.
- Păstrați produsul ferit de lumină, căldură și substanțe chimice.
- Țineți-l departe de dezinfectanți și de vapori.

Efecte secundare:

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu acest dispozitiv trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care vă aflați.

Eliminarea în siguranță a dispozitivului

Eliminați TOSI-LumCheck în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Versiunea și data emiterii instrucțiunilor de utilizare.

Versiune: 2.0 Data: 22.07.2025